

Spinning spiros

Suljettu uros luer-lock-järjestelmä

Käyttöopas

1 Luer-lockin liittäminen



- Tartu Spirokseen ja liitä standardi luer-lock liitântään.
- Kierrä yhteen kunnes kuulet klikkauksen ja Spiros kiertyy vapaasti.
- Spiros on nyt kiinteästi liitetty luer-lockiin.
- Spiros on jatkuvasti suljettu, kun se ei ole kiinnitetty mihinkään porttiin.

2 Vapaasti kiertyvä



- Varmistaaksesi oikean liitännän tarkista, että Spiros kiertyy vapaasti.

3 Spiros-liittimen kytkeminen



- Liitä Spiros injektiokalvoon tai naaras luer-lockiin infusoidaksesi tai aspiroidaksesi.
- Tartu Spirokseen ja kierrä myötäpäivään liittääksesi sen.

4 Spiros-liittimen irrottaminen



- Irrottaaksesi Spiroksen, tartu Spirosiin ja kierrä vastapäivään kunnes liitântä irtaana.
- Spiros on kiinteästi suljettu, kun se irrotetaan.



Katso pakkauksesta koko käyttöohje, tämä ohje on ainoastaan opas käyttäjille.