


## Käyttöopas

### 1 Liittäminen injektiopulloon



- Aseta injektiopullo pystyyn tasaiselle pinnalle
- Kohdista injektiopiikin kärki keskelle injektiokalvoa.
- Erotta siivekkeet peukalolla ja etusormella.
- Paina kärki niin syväälle kuin mahdollista.
- Irrota ote siivekkeistä ja tarkista, että ne lukittuvat pullonkaulaan.

### 2 Spiros-venttiilin asettaminen

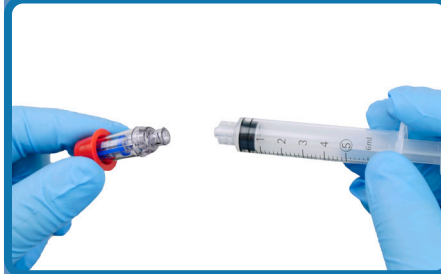

- Kiinnitä Spiros ruiskuun, kierrä Spirosta myötäpäivään kunnes se "klikkaa" ja pyörii vapaasti.
- Varmistaaksesi oikean kiinnityksen, tarkista että Spiros pyörii vapaasti.

### 3 Spiros-venttiilin liittäminen



- Liitä Spiros tarttumalla sen runkoon ja kiertämällä myötäpäivään Spike-porttiin kunnes se on lukittunut ja kiinnittynyt.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla ●●●

## ! Neuvoja ja ohjeita

**\* Käytä aina luer-lock-ruiskua Spirossa turvallisuuden maksimoimiseksi.**

## ! Perusliuoksen valmisteleminen

4



- Aseta injektiopullo pystyyn tasaiselle pinnalle.
- Injisoi neste hitaasti injektiopulloon.

4



- Älä koskaan injisoi nestettä tai ilmaa injektiopulloon sen ollessa ylösalaisin.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla ●●●

**5** Sekoittaminen



- Sekoita aina injektio-pullo pallonki/filtteri itseesi päin.


**5** Sekoittaminen



- Älä koskaan sekoita injektio-pulloa ylösalaisin.



**6** Aspiointi



- Käännä injektio-pullo ja ruisku ylösalaisin.  
- Vedä neste ulos injektio-pullosta.  
- Poista ilmakuplat ennenkuin irrotat ruiskun, jossa Spiros on kiinni.

**7** Spiros-venttiilin irrottaminen



- Poista Spiros tartumalla sen runkoon ja kiertämällä portista vastapäivään kunnes se on irti.  
- Spiros sulkeutuu automaattisesti kun se on irrotettu.

**8** Liittäminen potilaaseen



Kytke Spiros MicroClave-potilasliittymään.

**!** Katso pakkauksesta koko käyttöohje, tämä ohje on ainoastaan opas käyttäjille.