

# ChemoClave® -infuusioadapteri Clave-portilla, CH13

## Käyttöopas

### 1 Käyttöönottoon valmisteleminen



Poista tulppa infuusioadapterin  
letkun päästä.

### 2 Yhdistäminen



- Sulje infusiolaitteen rullasulkija.
- Vie infusiolaitteen kärki infuusioadapterin letkuun.
- Huomioi, että koko kärjen pitää olla infuusioadapterin letkussa vuotojen estämiseksi.

### 3 Infuusiopussiin/ -pulloon liittäminen



- Vie infuusioadapterin kärki pussiin/pulloon.
- Täytä tippakammio puolilleen, avaa rullasulkija ja huuhto laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.

### 4 Lääkkeen lisääminen



Liitä ruisku porttiin ja lisää  
lääke pussiin/pulloon.

### 5 Potilaaseen liittäminen



Kytke potilasliitännään ja infusoi  
määräysten mukaisesti.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla ●●●

# ChemoClave® CH-13

## Käyttöopas jatkuu

### Täysin suljettu huuhtelu

#### 1 Spiros-liittimen käyttö



Liitä Spiros-liitin infuusiolaitteen päähän (potilasliitäntä).

#### 2 Liitäntä



Liitä Spiros-liittimen toinen pää infuusioadapterin Clave-liitäntään.

#### 3 Huuhteleminen



- Avaa rullasulkija ja nosta tippakammio Spiron kanssa samalle korkeudelle.
- Infuusiolaite alkaa välittömästi täyttymään nesteellä.
- Varmista, että kaikki ilma poistuu huuhdeltaessa.

#### 4 Irrottaminen



- Kun infuusiolaite on täyttynyt eikä ilmaa ole jäljellä, irrota Spiros-liitin Clave-liitännästä kiertämällä vastapäivään.
- Spiros-liitin sulkeutuu automaattisesti kun se on irrotettu.

**!** Katso pakkauksesta koko käyttöohje, tämä ohje on ainoastaan opas käyttäjille.