

## Käyttöopas

### 1 Liittäminen injektiopulloon



Poista kansi  
vetämällä  
ulkonemasta.

- Aseta injektiopullo pystyyn tasaiselle pinnalle.
- Kohdista injektiopiikin kärki keskelle injektiokalvoa.
- Erota siivekkeet peukalolla ja etusormella.
- Paina kärki niin syväälle kuin mahdollista.
- Irrota ote siivekkeistä ja tarkista, että ne lukittuvat pullonkaulaan.

### 2 Spiros-venttiilin kiinnittäminen



- Kiinnitä Spiros ruiskuun, kierrä Spirosta myötäpäivään kunnes Spiros "klikkaa" ja pyörii vapaasti.
- Varmistaaksesi oikean kiinnityksen, tarkista että Spiros pyörii vapaasti.

### 3 Spiros-venttiilin liittäminen



- Liitä Spiros tartumalla sen runkoon ja kiertämällä myötäpäivään Spike-porttiin, kunnes se on lukittunut ja kiinnittynyt.

Aspirointi: siirry suoraan kohtaan 6. ● ● ●

## ! Neuvoja ja ohjeita

- \* Käytä aina luer-lock-ruiskua Spirossa turvallisuuden maksimoimiseksi.
- \* Pallonki on sovitettu ampullikokoihin 1-100 ml. Sulkeutuu turvallisesti vaikka maksimaalista laajenemista ei tapahdu.

## ! Perusliuoksen valmisteleminen



- Aseta injektiopullo pystyyn tasaiselle pinnalle.
- Injisoi neste hitaasti injektiopulloon.



- Älä koskaan injisoi nestettä tai ilmaa injektiopulloon sen ollessa ylösalaisin.

Ohje jatkuu seuraavalla sivulla ● ● ●

# ChemoClave<sup>®</sup>, Universal, suljettu Käyttöopas jatkuu

## 5 Sekoittaminen



- Sekoita aina injektio-  
pullo pallonki/filteri  
itseesi päin.

## 5 Sekoittaminen



- Älä koskaan sekoita  
injektio-pulloa ylösalaisin.

## 6 Aspiointi



- Käännä injektio-  
pullo ja  
ruisku ylösalaisin.  
- Vedä neste ulos injektio-  
pullosta.  
- Poista ilmakuplat ennen-  
kuin irrotat ruiskun, jossa  
Spiros on kiinni.

## 7 Spirosin irrottaminen



- Poista Spiros tartumalla sen  
runkoon ja kiertämällä portista  
vastapäivään kunnes se on irti.  
- Spiros sulkeutuu automaattisesti  
kun se on irrotettu.

## 8 Liittäminen potilaaseen



Kytke Spiros  
MicroClave-potilasliittymään.



Katso pakkauksesta koko käyttöohje, tämä ohje on ainoastaan opas  
käyttäjille.