

MicroClave & NanoClave Neulattomat liittimet

- Täyttövolyymi 0,04/0,02 ml
- Hyväksytty 7 vrk käyttöön
- 600 aktivointia
- MRI-yhteensopiva
- Jaettu väliseinästä neutraali-paineella
- Yhteensopiva veren, rasvan ja sytostaattien kanssa
- PVC- ja lateksivapaa



Käyttöopas

1 Aloittaminen



- Avaa pakkaus ja ota MicroClave/NanoClave esille aseptisesti.
- Liitä ruisku ja täytä ylösalaisin.
- Poista suojus ja ruuvaa MicroClave/NanoClave kiinni sentraaliseen, perifeeriseen tai arteria IV -katetriin/kanyyliin.

2 Liittäminen



- Luer slip liitetään MicroClave/NanoClaveen kiertämällä ruiskua neljäosakerros.
- Luer lock ruuvataan myötäpäivään kunnes se lukittuu.
- Veren infuusiossa tai aspiraatiossa MicroClavea ei tarvitse vaihtaa, ainoastaan huuhdella.
- Mikäli näkyvää verta jää jäljelle, tulee MicroClave/NanoClave vaihtaa.

3 Desinfiointi



- Desinfioi MicroClave/NanoClave vähintään 3 sekunnin ajan tai paikallisten ohjeiden mukaan.
- Yhteensopiva: IPA (isopropyylialkoholi) ja klooriheksidiini.
- Voidaan käyttää desinfiointikorkin kanssa.

4 Irrottaminen



- Tartu MicroClaveen/NanoClaveen.
- Kierrä vastapäivään kunnes kiinnitys irtoaa.
- Huuhtelee paikallisten ohjeiden mukaan.
- Luer lock -tulppaa/korkkia/capiä ei saa käyttää.
- Desinfiointikorkkia saa käyttää.



Katso pakkauksesta koko käyttöohje, tämä ohje on ainoastaan opas käyttäjille.