

# Kasvosuoja evercare® TYPE II, korvalenkit, valkoinen ei sisällä luonnonkumia

Kertakäyttöinen **evercare®** TYPE II on laadukas 3-kerroksinen kasvosuoja, joka soveltuu sekä terveydenhoidon henkilökunnan ja potilaiden suojaamiseen että kuluttajakäyttöön. **evercare®** TYPEII -kasvosuoja täyttää sairaalakäyttöön vaadittavan EN14683:2019-standardin Type II -vaatimusten osalta.

Kasvosuojan väri on valkoinen ja siinä on joustavat korvalenkit.

Ei sisällä luonnonkumia. Kasvosuojan BFE-arvo (bakteerisuodattavuus) on  $\geq 98$  %.

- Kertakäyttöinen **evercare®** Type II -kasvosuoja kuluttajapakkauksessa
- Valkoinen, korvalenkeillä
- Täyttää standardin 14683:2019 vaatimukset
- BFE (bakteerisuodatus)  $\geq 98$  %
- OneMed tuotekoodi ONE2883
- Myyntipakkaus 2160 kpl (18 x 120 kpl rasiaa)
- 120 kpl rasia sisältää 12 x 10 kpl pussia, joissa käytönopaste, kuluttajamerkinnot ja suomenkieliset tekstit
- Valmistaja OneMed Group Oy, valmistusmaa Kiina





# evercare®-kasvosuojan käyttöohje



- Pese tai desinfioi kädet ennen kasvosuojan pukemista.
- 1** Älä koske kasvosuojan suojaosaan, vaan tartu siihen ainoastaan reunoista. Kasvosuojan yläreunassa on tukilanka, joka tulee nenänvarteen – nipistä tukilankaa niin, että suoja asettuu tiiviisti ja peittää suun, nenän ja leuan.
- 2** Korvalenkit tulevat korvien taakse, ne on helppo asettaa joustavan materiaalin ansiosta.
- 3** Vedä lopuksi kasvosuojan alareuna paikoilleen, jolloin laskokset avautuvat.
- Huomioi seuraavat seikat:
  - Kasvoilla olevaa suojaa ei tule kosketella.
  - Älä syö, juo tai tupakoi kasvosuoja vedettynä leuan alle tai roikkumaan toisesta korvasta.
  - Kasvosuoja riisutaan vetämällä korvalenkeistä, laita suoja käytön jälkeen valittömästi roska-astiaan.
  - Riisuessasi suojaa älä koskettele sen ulkopintaa.
- Pese tai desinfioi kädet aina ennen kasvosuojan riisumista ja sen jälkeen.
- Muista että kertakäyttöinen kasvosuoja on kertakäyttöinen, eikä sitä saa käyttää uudelleen.

Kasvosuojaa ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai on muita terveyteen liittyviä syitä, jotka estävät suojan käytön. Keskustele tarvittaessa hoitavan lääkärin kanssa, jos terveydentilasi vaikeuttaa kasvosuojan käyttöä.

*Kertakäyttöinen evercare®-kasvosuoja on laadukas 3-kerroksinen kasvosuoja, joka soveltuu käyttäjän suu-/nenäsuojaksi, kun halutaan välttää mahdollisen tartunnan leviäminen pisaratartuntana omasta uloshengitysilmastasta. Estää myös käyttäjää koskettamasta kasvojaan.*

*evercare®-kasvosuoja täyttää sairaalakäyttöön vaadittavan EN14683:2019-standardin Type II -vaatimusten osalta (ONE2882 ja ONE2883). Kasvosuojan väri on valkoinen ja siinä on joustavat korvalenkit. Kasvosuojan BFE-arvo (bakteerisuodattavuus) on vähintään  $\geq 98$  %. Tuote ei sisällä luonnonkumia.*