


3M

Cavilon™

Skin Care Solutions

3M™ Cavilon™ Advanced käyttöohje

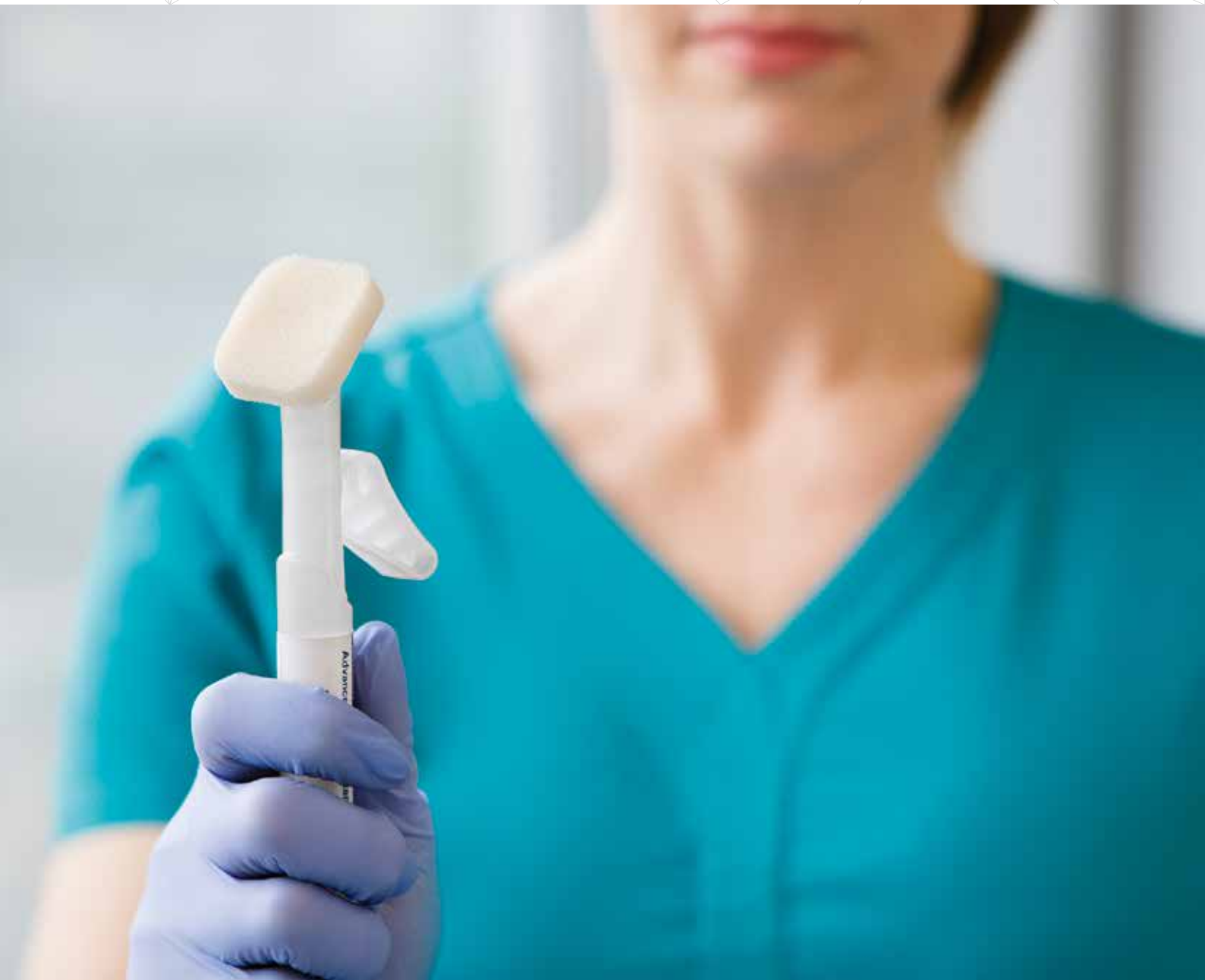

Ohje 3M™ Cavilon™ Advanced Ihonsuojakalvon käyttöön

Kosteuden aiheuttamien ihovaurioiden (MASD) ennaltaehkäisyyn ja hoitoon

Tarvittavat tuotteet:

- ▶ 3M™ Cavilon™ Pesu- ja puhdistuspyyhkeet tai pelkkää vettä
- ▶ Nukkaamattomia liinoja
- ▶ 3M™ Cavilon™ Advanced Ihonsuojakalvoa
- ▶ Suojakäsineet

Esivalmistelut



Laita tuotteet puhtaalle tasolle.



Avaa Cavilon Advanced Ihonsuojakalvon pakkaus ja anna aplikaattorin olla muovisessa pussissa.

Laita potilas hyvään asentoon ja puhdista iho



Laita potilas hyvään asentoon (paljasta vain puhdistettava ihoalue ja peitele muuten potilas, jotta potilaalla on lämmin ja hyvä olla).



Puhdista ihoalue hellävaraisesti pH-tasapainoitetulla puhdistusaineella tai pelkällä vedellä. Kuivaa alue varovasti. Jos iho on rikkoutunut ja erittävä, kuivaa ihoaluetta tarvittaessa taitoksella..

Vaihda suojakäsineet



Vaihda suojakäsineet.

Aplikaattorista riittää ihonsuojakalvoa noin A4 paperin kokoiselle ihoalueelle.

Voit käyttää useamman aplikaattorin tarvittaessa peittämään koko ihoalueen.

Katso Cavilon Advanced Ihonsuojakalvon käyttöohjeet mahdollisia kontraindikaatioita, varoimenpiteitä ja varoituksia varten.

Sivele 3M™ Cavilon™ Advanced Ihonsuojakalvo



6 Tartu aplikaattoriin ja aseta peukalo vivun päähän.

Osoita aplikaattorin vaahtomuovipää alaspäin ja paina vipu peukalolla alas, jotta aplikaattorin ampulli rikkoutuu.

Voit kuulla poksahdavan äänen, kun ampulli rikkoutuu; vipua ei tarvitse enää painaa tämän jälkeen.



7 Pidä aplikaattori osoitettuna alaspäin ja anna nesteen valua noin 10 sekunnin ajan alaspäin vaahtomuoviin. Neste valuu itsestään alas, eikä vipua tarvitse enää painaa.

Neste ei täysin imeydy vaahtomuovin reunoille saakka.



8 Sivele vaahtomuoviaplikaattorilla Cavilon Advanced Ihonsuojakalvo vahingoittuneelle alueelle sekä ympäröivälle iholle. Tee tasaista ja sivelevää liikettä ja vältä päällekkäistä pyyhkimistä. Aplikaattorilla voi pyyhkiä kaikkiin suuntiin. Aplikaattorin vipua ei tarvitse painaa enää tässä vaiheessa.

Aplikaattoria ei tarvitse puristaa. Ylimääräinen puristaminen saattaa aiheuttaa nesteen valumista ja ihoalueen liiallista kastumista.



9 Jatka tuotteen levittämistä hoidettavalle ihoalueelle, kunnes koko alue on käsitelty ihonsuojakalvolla. On tärkeää käsitellä kosteudelle altistuva ihoalue kokonaan ihon altistuessa eritteille, kuten uloste tai virtsa.



10 Anna ihonsuojakalvon kuivua iholla ainakin 30 sekuntia levittämisen jälkeen, kunnes pinta tuntuu kuivalta. Mikäli jokin ihoalue on jäänyt käsittelemättä, odota kunnes ihonsuojakalvo on täysin kuivunut ennen kuin levität iholle lisää tuotetta.



11 Jos olet sivellyt kalvoa poimuiselle ihoalueelle tai alueelle, jossa ihot ovat vastakkain, pidä ihoalueet erillään ja anna kalvon kuivua kunnolla (vähintään 30 sekuntia).

Lisätiedot



Ihonsuojakalvoa tulee levittää kaksi kertaa viikossa. Cavilon Advanced Ihonsuojakalvo on vedenkestävä eikä se lähde peruspuhdistamisen yhteydessä. Liiallinen kalvon lisääminen kasaantuu iholle.

Huomioi, että 30 sekuntia on minimiaika ihonsuojakalvon kuivumiselle. Kuivumisaika voi vaihdella yksilöllisesti potilaiden / hoitokoti asukkaiden välillä riippuen ihotyypistä, altistuksesta ja ihorikon aiheuttajasta. Kuivumisaika voi vaihdella 30 sekunnista aina 5 minuuttiin tai kauemmin. Varmista, että tuotetta on iholla sopiva määrä. Anna ihonsuojakalvon kuivua rauhassa kunnes se on "pintakuiva". Tämä on tärkeää etenkin niillä potilailla, joilla on inkontinenssivaippa /-suoja.

Kalvo kuluu itsestään pois, eikä sitä tarvitse erikseen poistaa. Jos kalvo halutaan poistaa jostain syystä, käytä liimanpoistoainetta (tulee sisältää: hexametyldisiloxane tai silikonipolymeriä).

On suositeltavaa käyttää liimanpoistoainetta (tulee sisältää: hexametyldisiloxane tai silikonipolymeriä), kun liimallista sidosta tai teippiä poistetaan ihoalueelta, joka on käsitelty Cavilon Advanced Ihonsuojakalvolla.

Koe kuinka 3M™ Cavilon™ Advanced ihonsuojakalvo antaa sinulle voimia pysäyttää, kumota, ennaltaehkäistä – ja lopettaa – MASD (moisture associated skindamage).

Lisätietoja osoitteessa 3M.fi tai ota yhteyttä paikalliseen tuoteasiantuntijaan.

Tilauksetiedot

3M™ Cavilon™ Advanced Ihonsuojakalvo

3M Tuotenumero	Koko	kpl/pakk.
5050G	2,7 ml applikaattori	20
5050G-4P	2,7 ml applikaattori	4



Suomen 3M Oy
Terveystuotteet
Keilaranta 6
02510 ESPOO
Puh. (09) 52 521
www.3M.fi
www.Cavilon.fi

Cavilon on 3M Companyn omistama tuotemerkki.
Muistathan kierrättää. Painettu Suomessa. ©3M 2019.
Kaikki oikeudet pidätetään. OMG60179.