



DropSafe

Turvakynäneulat



4S!

Hoitosuunnitelman
hallinta



Turvallinen



Helppo-
käyttöinen



Hellä



Älykäs



Tuotteen käyttötarkoitus:

- >> DropSafe-turvakynäneulat ovat steriilejä, kertakäyttöisiä neuloja, jotka on tarkoitettu lääkeaineen pistämiseen injektiokynissä.
- >> DropSafe-turvakynäneulat soveltuvat sekä kliiniseen että ei-kliiniseen käyttöön.

Tuotteen ominaisuudet:

Turvallinen



- >> Turvallisesti vaipalla suojattu neula, mikä ehkäisee vahingossa tapahtuvan pistämisen.

Lukituksen varmistus

- >> Näkyviin tulee punainen raita, kun neula on lukkiutunut.



Vahinkopistoja ehkäisevät ominaisuudet*

Lukituksen varmistus

- >> Neula lukkiutuu automaattisesti käytön jälkeen.



Helppokäyttöinen



- **Helppo kiinnitys** >> DropSafe-turvakynäneulat soveltuvat useimpiin markkinoilla oleviin injektiokynisiin.**
- **Kätevä** >> Kierrä paikalleen, pistä ja hävitä.
- **Neulan pituudet** >> Kaksi kokovaihtoehtoa erilaisiin tarpeisiin (31G x 6 mm, 31G x 8 mm).

Se on helppoa...





- Turvallinen
- Helppokäyttöinen
- Hellä
- Älykäs



*Tutkitusti Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) ohjeiden mukainen: Medical Devices with Sharps Injury Prevention Features, Issued on August 9, 2005.

** http://hti-strefa.com/wp-content/uploads/2017/03/Broszura_Us.pdf

Hellä

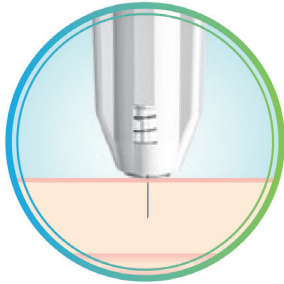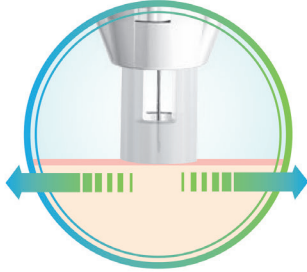

- **Hellävarainen kosketus**

>> Tasaisesti liukuva suojavaipan pinta voi jakaa ja vähentää painetta pistoskohdassa.

- **Käyttömukavuus**

>> Ainutlaatuinen sisäinen voitelumenetelmä Droplicon™ varmistaa miellyttävän ja tavallista kivuttomamman pistämisen.

- **Piilotettu neula**

>> Neula ei ole näkyvässä, mikä saattaa parantaa potilasmukavuutta.

Älykäs




- **Neulantarkasteluikkuna**

>> Lääkeaineen virtaus on helppo nähdä (esitäyttö).



- **Korkea laatu**

>> Ohut seinämä mahdollistaa lääkeaineen helpon ja optimaalisen annostelun.

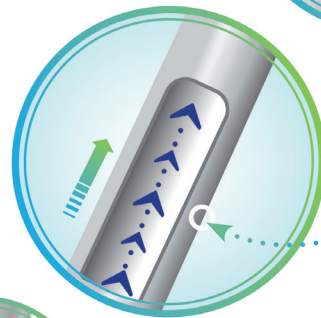

Ohut seinämä



- **Ergonomia**

>> DropSafe-turvakynän siipimäinen muotoilu varmistaa miellyttävän ja pitävän otteen kynästä.



4S

- Turvallinen
- Helppokäyttöinen
- Hellä
- Älykäs

 **DropSafe**
Turvakynäneulat



4S:

- Turvallinen
- Helppokäyttöinen
- Hellä
- Älykäs

Hoitosuunnitelman hallinta

Saatavilla kaksi kokoa:



DropSafe 31G

(0,25mm) x 6mm,
myyntipakkaus 100 kpl



DropSafe 31G

(0,25mm) x 8mm,
myyntipakkaus 100 kpl

CE 0344



Käyttöohje



Hoitosuunnitelman hallinta

1

Kääny terveydenhuollon ammattilaisen puoleen, kun tarvitset neulan pituuden valintaan, pistoskohdan määrittelyyn ja tarkoituksenmukaisiin tekniikoihin liittyvää apua.

2

Älä käytä turvakynäneulaa, jos sinetti tai ulompi suojus on vaurioitunut tai puuttuu, tai jos suojavaipassa tai neulassa näkyy vaurioita.

3

Älä purista suojavaippaa ennen kynän käyttöä! Suojavaipan puristaminen voi lukita neulan ja turvakynäneula on käyttökelvoton. Turvakynäneulaa ei voi käyttää, jos suojavaipassa näkyy punainen lukitusmerkki (kuva 8).

4

Noudata DropSafe-turvakynäneulan ja injektiokynän käyttöohjeita.

5

Hävitä käytetyt turvakynäneulat aina terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemistä koskevien ohjeiden tai paikallisten määräysten mukaisesti (kuva 10).

REFERENCES:

- HTL - STREFA S.A. – data on file - FINAL REPORT - SIMULATED CLINICAL USE TESTING ON THE DROPSAFE SAFETY PEN NEEDLE, 17 January 2017, Version 1.0
- www.cdc.gov – Sharps Injury prevention
- COUNCIL DIRECTIVE 2010/32/EU of 10 May 2010 implementing the Framework Agreement on prevention from sharp injuries in the hospital and healthcare sector concluded by HOSPEEM and EPSU
- American Society of Health-System Pharmacists. Recommendations for Safe Use of Insulin in Hospitals <https://www.ashp.org>
- Greenwood B, Szumita PM, Pendergrass M. Conversion to insulin devices in the inpatient setting. Am J Health Syst Pharm. 2008;65:698-699
- Davis EM, Christensen CM, Nystrom KK, Foral PA, Destache C. Am J Health-Syst Pharm. 2008;65(14):1347-1357
- Davis EM, Bebee A, Crawford L, Destache C. Nurse satisfaction using insulin pens in hospitalized patients. The Diabetes Educator. 2009(Sep/Oct);35(5).
- Medical Devices with Sharps Injury Prevention Features, Issued on August 9, 2005.

HTL STREFA
high tech lab



HTL-STREFA S.A.
ul. Adamówek 7, 95-035 Ozorków, Poland
Tel. +48 270 00 10, Fax: +48 270 00 20
info@htl-strefa.pl, www.htl-strefa.com

 /HTLSTREFA

CE mark refers to the product not for the brochure. Product is not available in the US.

820/ALL/07/2017

OneMed Oy, 10/2020

Markkinointi: OneMed Oy
PL 10 (Metsäläntie 20), 00321 Helsinki
www.onemed.fi
puh. 020 786 6810, asiakaspalvelu@onemed.com

ONEMED